

COLPOPROBE COLPOTOMY VAGINAL TUBES



Jan Bye a.s

MEDISINSK TEKNIKK

www.janbye.no post@janbye.no



CVT-1

CVT-1 , Colpoprobe sett med pakninger og keramisk tupp

Sett med 3 koppstørrelser \varnothing : 25/35 - 30/40 - 40/50mm


CVT 2-7 finnes i 3 forskjellige størrelser
 \varnothing = inner-/ytterdiameter



CVT-2

CVT-2, Colpoprobe med vinklet tupp

\varnothing : 25/35 - 30/40 - 40/50mm

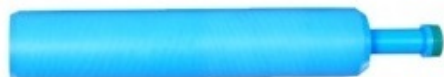

CVT-3

CVT-3, Colpoprobe med rett tupp

\varnothing : 25/35 - 30/40 - 40/50mm



CVT-4

CVT-4, Colpoprobe med fordypning

\varnothing : 25/35 - 30/40 - 40/50mm



CVT-5

CVT-5, Colpoprobe med keramisk vinklet tupp

\varnothing : 25/35 - 30/40 - 40/50mm



CVT-6

CVT-6, Colpoprobe med keramisk rett tupp


\varnothing : 25/35 - 30/40 - 40/50mm



CVT-7

CVT-7, Colpoprobe med stålkant, rett tupp

\varnothing : 25/35 - 30/40 - 40/50mm

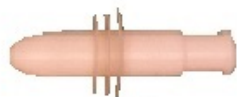

VO-1

VO-1, Occluder

Colpoprobe CVT

Colpoprobe brukes til laparoskopisk hyserektomi (LH/LAVH) sammen med 10mm fettetang. Ved hjelp av fettetangen trekkes portio/uterus inn i colpoproben slik at fornix presenteres tydelig gjennom optikken. Colpotomien utføres med diatermi, ultralydkniv el.

CVT-1 består av et sett med 3 størrelser og har et håndtak med justerbare silikonpakninger som er ment å tette for gassen slik at pneumoperitoneum opprettholdes ved colpotomi.

Når uterus er fjernet kan Occluderen VO-1 føres inn i vagina for på den måten og hindre gasslekkasje mens vaginaltoppen lukkes.